

## **Назначение и правила эксплуатации поручней для маломобильных групп населения**

В последние годы наше государство приступило к реализации социальных программ для маломобильных групп населения. Основой данных программ является создание комфорта для инвалидов.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

В среднем около 10% населения любой страны составляют люди с физическими или сенсорными расстройствами. Сейчас наши города мало приспособлены для жизни инвалидов. Без помощи других людей они практически не могут совершить те действия, которые у нас не вызывают никаких затруднений.

Маломобильной группе для совершения жизненно необходимых действий очень помогают поручни. Поручни для инвалидов обеспечивают им необходимую поддержку при ходьбе, стоянии и сидении. Непременными условиями являются удобство пользования и прочность даже при больших нагрузках. В зависимости от использования поручни для инвалидов могут быть различных видов, также устанавливаться различными способами.

Поручни для инвалидов бывают:

- Откидными;
- Поворотными;
- Стационарными.

Поручни должны быть плотно прикреплены к стене и фиксироваться подпорными стойками. Лицо с ограниченными возможностями должно иметь достаточно пространства, очень важно, чтобы человек мог легко пересечь с коляски на унитаз и обратно без посторонней помощи, ведь в этом и заключается смысл поручней для инвалидов – они изобретены для предоставления человеку с физическим недугом большей самостоятельности и свободы действий.

При установке важно соблюсти все стандарты и нормы, чтобы облегчить их использование.

**Рекомендации по установке:**

- При установке поручней необходимо учесть максимально удобное положение для их использования;
- Поручни должны быть установлены так, чтобы не препятствовать свободному доступу в помещение;
- Поручни должны быть закреплены на ровной поверхности!
- Поставляемый в комплекте крепеж предназначен для кирпичных и бетонных стен.

**Внимание! Работы по установке поручней необходимо доверять только квалифицированным специалистам!**

**Если стены имеют слабую структуру (гипсокартон, пенобетон и т.п.), для надежной фиксации поручней настенного монтажа необходимо предусмотреть закладные элементы, либо специальные системы инсталляции.**

**Рекомендации по эксплуатации:**

- Выбор типа опорного устройства следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТа;
- Поручни используются как дополнительная опора для маломобильных групп населения и людей с ограниченными физическими возможностями;
- Данные изделия запрещается использовать не по назначению;
- Для сохранения покрытия поручней необходимо периодически проводить санитарную обработку, путем протирания поверхности салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствора хлорамина ГОСТ 14193;
- Сильные загрязнения, успевшие затвердеть, следует сначала размочить, а затем удалить сухой тряпкой, чтобы не оставить царапин;
- Запрещается применять твердые малозернистые абразивные вещества, жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность, а также не использовать чистящие средства, содержащие абразивы.

Все изделия, представленные в этом разделе, разработаны нашей компанией, они изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304: труба диаметром 32, 25 или 18 мм, а также используется профильная труба.